

Klepp®

DENTICID

Solución desinfectante dental -
Clorhexidina Gluconato 2%

Desinfección de cavidades o preparaciones
en operatoria dental y prótesis.

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.
Industria Argentina

Elaborado por: RAYSAN S.A - Lerma 429 CABA, Argentina. Legajo Nro 1276. DT: G. Kerdmann, Farmacéutica - M.N. Nro 10465. Distribuido por GRIMBERG DENTALES S.A. Lerma 426, CABA, Argentina. Legajo Nro 510. DT Y. Cardozo M.N. Nro 14444. Atención al consumidor: 5411 4777 2022 www.grimbergdentales.com Autorizado por la ANMAT - P.M. N° 1276-44

Composición: CLORHEXIDINA GLUCONATO 2.0 % . Surfactante volátil , excipientes csp 100%

Indicaciones: Klepp Denticid es una solución de gluconato de clorhexidina al 2% indicada para: Desinfección de cavidades o preparaciones en operatoria dental y prótesis.

Instrucciones: Klepp Denticid no interfiere en la adhesión de la restauración. Puede utilizarse para preparaciones cavitarias o de prótesis y en combinación con composites, amalgamas, cementos de resina y ionómeros vítreos.

Antimicrobiano para operatoria y prótesis:

- Utilizar antes de la cementación de coronas (temporarias y / o permanentes) y para preparaciones de coronas, inlays amalgamas y composites.
- Colabora en reducir potenciales pulpitis y sensibilidad post operatorias utilizándolo previo a sellados y restauraciones.

Modo de uso: Operatoria / Prótesis

Aplique klepp Denticid durante 60 segundos frotando con algodón , pincel o microaplicador.

Seque cuidadosamente con aire.

No enjuague.

Continúe normalmente con la técnica de trabajo.

Cuando se colocan restauraciones directas o cementadas por resina, no se ha verificado reducción en la fuerza de adhesión cuando Denticid se aplica antes o después del grabado ácido

Precauciones: No utilizar en canales que estén húmedos con hipoclorito de sodio porque se formará un precipitado marrón. Enjuague con agua antes de colocar KLEPP DENTICID El hipoclorito de sodio tiene un efecto negativo en las paredes del canal radicular. Por eso hay que irrigar con KLEPP DENTICID antes de llenar el canal con el material.

No permita que se ingieran volúmenes del material. Elimine el material extraño con técnicas de vacío

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a clorhexidina.

Mantener el producto lejos de los niños

No utilice este producto si su envase se encontrara dañado o roto.

Contraindicaciones: no posee. **Conservación:** Consérvese al abrigo de la luz solar directa, en