

Klepp® Dentin Conditioner

Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Agente acondicionador
de cavidades dentales

Dental cavities conditioner

Klepp Dentin Conditioner.

Solución de ácido poliacrílico al 10%.

Limpia las superficies del diente optimizando la adhesión de los cementos del ionómero vítreo.

Provee mayor longevidad a la restauración al mejorar el sellado marginal.

Disminuye el riesgo de sensibilidad postoperatoria al dejar pasta viscosa en los tubulus.

Composición: 10% Ácido poliacrílico
Excipientes c.s.p.100.

Modo de uso:

1. Agite bien el producto antes de usar
2. Luego de la preparación del diente aplicar durante 20 segundos KLEPP DENTIN CONDITIONER a las superficies de unión utilizando una torunda de algodón o hisopo.
3. Enjuagar bien con agua. Secar tocando con una torunda de algodón o hisopo o aplicando aire suavemente con una jeringa de aire. NO Secar totalmente. Los mejores resultados se obtienen cuando las superficies preparadas aparentan estar húmedas (reflectantes).
4. Aplicar ionómero de vidrio como agente de unión de base/ protector de cavidades o material restaurador.
5. Tapar el frasco inmediatamente después del uso.

Conservación: Debe ser almacenado entre 10° a 24° C correctamente cerrado. No exponer al sol.

Advertencias / Contraindicaciones:

Si bien el producto no entra en contacto con

tejidos blandos si se usa correctamente, en casos excepcionales podría ocurrir hipersensibilidad al ácido poliacrílico. Interrumpir el tratamiento.

Indicaciones Recomendadas:

Klepp Dentin Conditioner. Solución de ácido poliacrílico al 10%.

Es una solución diluida de ácido poliacrílico destinada a remover la capa de barrillo de la superficie del diente y para acondicionar la dentina, mejorando así la unión entre el cemento de ionómero de vidrio y la dentina.

Precauciones:

Luego de dejar 20 segundos enjuagar con agua.

Para uso exclusivo de profesionales.

Usar según las instrucciones.

Agite bien el producto antes de usar.

Asegurar que el paciente no sea alérgico a los materiales.

Para uso odontológico.

Mantenga alejado del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse con los centros de Toxicología Tel: 0800 333 0160 o Centro Toxicológico La Plata, tel 0800 222 9911.

En caso de contacto con el tejido oral o la piel, enjuagar inmediatamente con agua.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar atención médica.

Elaborado por: RAYSAN S.A., Legajo 1276 - Lerma 429 - CABA - Argentina. Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad certificado según ISO 9001, bajo el alcance de productos de uso odontológico consumo masivo y uso profesional.
Director Técnico: Farmacéutica Gabriela Kerdmann. M.N. N° 10.465
Autorizado por la ANMAT P.M. N° 1276-36
Distribuido por: GRIMBERG DENTALES SA, Legajo 510 - Lerma 426. CABA. Argentina. Atención al consumidor: 5411 4777 2022
www.grimbergdentales.com