

Klepp Flúor neutro

Composición: Fluoruro de sodio 2.0% Xilitol 2%, excipientes csp 100%.

Fórmula neutra ideal para pacientes con restauraciones cosméticas, porcelana o resina.

Su balance neutro permite mejor tolerancia y aceptación del fluoruro por los pacientes. Gel tixotrópico. Fácil de aplicar.

Indicaciones: Provee resistencia del esmalte dental a los ácidos producidos por las enzimas bacterianas.

Remineralización del esmalte dental en caries iniciales.

Post tratamiento de blanqueamiento.

Desensibilización de cuellos y bases rellenas.

Parodontopatías.

Pacientes post irradiación

Modo de uso: Realice una completa limpieza de la boca del paciente.

Rellenar con gel hasta 1/3 parte de la cubeta aplicadora.

Secar la superficie dentaria e inserte la cubeta en la boca del paciente.

Mantener una mordida suave por el lapso de 4 minutos.

Generar un ligero movimiento de masticación, remover la cubeta para que el paciente pueda expectorar el gel.

El paciente no debe comer, tomar o enjuagarse por el transcurso de 30 minutos.

Precauciones: No ingerir. Mantenga alejado del alcance de los niños.

Producto apto celíacos.

Conservación: En lugar fresco y bien cerrado. No congelar.

Autorizado por la ANMAT PM-1276-2

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Elaborado por: RAYSAN SA. Legajo Nro 1276, Lerma 429, CABA, Argentina.

Dirección Técnica: Gabriela Kerdmann Farm. M.N. N°10.465

Distribuido por: GRIMBERG DENTALES SA, Legajo 510 - Lerma 426 - CABA - Argentina