

KLEPP PROPHY POWDER

Polvo para profilaxis odontológica

- A base de bicarbonato de sodio especial.
- Fluidez óptima.
- Protege el esmalte de la abrasión debido a su granulometría controlada.
- Inhibe la actividad ácida de la placa bacteriana gracias a su pH alcalino.

Composición: Bicarbonato de sodio, excipientes.

Indicaciones: Abra la tapa, saque la bolsita desecante. Envase especial, permite aislarlo de la humedad.

Agite antes de usar.

Llene el reservorio del equipo utilizando la totalidad del envase de KLEPP Prophy Powder.

Precauciones: Para uso odontológico. No para uso interno. Mantenga alejado del alcance de los niños. Por favor siga las instrucciones de fabricante del equipo limpiador.

Conservación: En lugar fresco, seco y cerrado correctamente, conservando el desecante.

Industria Argentina.

Distribuye: Grimberg Dentales S.A.

www.grimbergdentales.com

Atención al consumidor: 011-4777 2022



**Venta Exclusiva a Profesionales
e Instituciones Sanitarias**

Elaborador Raysan SA. Lerma 429, CABA, Argentina.

Legajo Nro 1276. Empresa certificada bajo normas ISO 9001:2008

DI: Gabriela Kerdmann Farm. MN. N° 10465

Elaborado bajo fórmula exclusiva de Grimberg Dentales SA.

Autorizado por la ANMAT. PM-1276-18 / 1276-48