

Uso Profesional Exclusivo

Klepp[®] PROPHY PASTE

PASTA ABRASIVA PARA LA LIMPIEZA DENTAL
Y ELIMINACIÓN DEL CÁLCULO DENTAL.

80g

C. Neto

- **Indicaciones Recomendadas:** Eliminación de las coloraciones debidas a alimentos, tabaco, etc. Pulido final en eliminación del cálculo dental. Pulido fino en obturaciones. Remoción de placa y decoloraciones. Eliminación de superficies rugosas.

Actúa por abrasión mecánica.

No contiene oxidantes. Permite terminar la eliminación del cálculo dental después del uso de curetas o ultrasonidos sin atacar el esmalte dental.

- **Precauciones:** Para uso odontológico. No para uso interno. Mantenga alejado del alcance de los niños.
- **Composición:** Sílice, excipientes csp 100%.
- **Conservación:** En lugar fresco y cerrado correctamente.

- **Modo de uso:** Extraer con ayuda de una espátula la cantidad de Klepp Prophy Paste a utilizar y colocarla sobre el cepillo o copa circular. Realice la tarea de profilaxis, de acuerdo al procedimiento estándar indicado para cada caso (remoción de placa, eliminación de coloraciones en los dientes, eliminación de cálculo dental, pulido, etc.).

Elaborado por Raysan SA. Leg 1276, Lerma 425. CABA. Argentina
Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad certificado según ISO 9001,
bajo el alcance de productos de uso odontológicos consumo masivo y uso
profesional. DT: Gabriela Kerdmann, Farm. MN Nro 10465.
Distribuye Grimberg Dentales SA. Leg 510. Lerma 426. CABA. Argentina
Tel: 5411- 4777 2022. www.grimbergdentales.com
Autorizado por la ANMAT - P.M. N° 1276-47